


# DR. BOEHM GmbH

## Flexy®-Löffel nach DR. BOEHM

- Erleichterung beim Essen eingeben von Kleinkindern, behinderten Personen, **Schluckstörungen, Dysphagien**, z. B. nach einem Schlaganfall.
- Ideal für die Altenpflege z. B. auch bei Problemen mit Zahnprothesen
- Generell wird beim Essen eingeben weniger verkleckert.
- Keine Verletzungsgefahr (z. B. am Gaumen bei Spaltpatienten).
- Ideal für die Arbeit der Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten.

Das Löffelmaterial entspricht internationalen Normen (EEC, FDA).

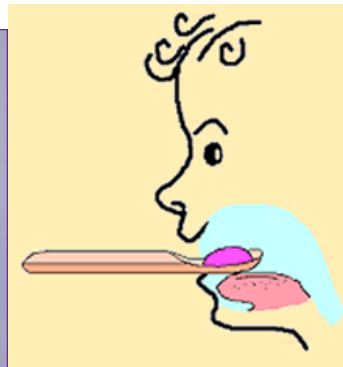

---

### Der Flexy®-Löffel

#### **revolutioniert die Technik der Essenseingabe!**

Jeder kennt die Situation: Essen eingeben kann sehr stressig sein!

Der normale Löffel wird mit der Nahrung in den Mund geschoben, umgedreht oder hochgezogen und es wird versucht, die Nahrung irgendwie abzustreifen. Mit etwas Glück bleibt ein Teil der Nahrung im Mund.

Der größte Teil der Nahrung wird vom Kleinkind wieder nach außen gedrückt. Jetzt muss der "Rest" von den Lippen und der Nase "abgekratzt" werden. Die Mühe fängt von vorne an.

#### **Der Grund:**

Mit einem harten Löffel im Mund, aber auch mit allen bisher bekannten weichen Löffeln, kann der Mensch nicht schlucken. Das geht grundsätzlich nicht! Um schlucken zu können, muss bei dieser Art von Löffeln der Löffel wieder aus dem Mund gezogen werden. Gleichzeitig müssen die Lippen die Nahrung vom Löffel abstreifen, sodass diese in der Mundhöhle verbleibt. Erst jetzt kann geschluckt werden.

Säuglinge, die bislang die Nahrung durch Saugen von der Brust oder der Flasche aufgenommen haben, müssen diesen Vorgang jedoch erst erlernen, dies dauert meist einige Monate

Alle Menschen, die aufgrund von Krankheit, Unfall, **Dysphagie** oder altersbedingt zur Steuerung der Lippenmuskulatur nicht mehr in der Lage sind, haben ein ähnliches Problem.

**Damit ist jetzt Schluss!**

**Mit dem superweichen Flexy®-Löffel wird die Essenseingabe zum Kinderspiel!**

---

**Stressfrei Essen eingeben mit dem Flexy®-Löffel**

**FUNKTION des Flexy®-Löffel:**

Die Zunge drückt den Löffel beim Schlucken an den Gaumen. Der nach oben offene (konkave) Löffel wird dabei umgestülpt und passt sich exakt dem Gaumen an. Seine Form wird durch die Gaumenwölbung konvex. Der Nahrungsbrei wird dabei seitlich in die Mundhöhle gepresst. Die Zunge gelangt dadurch so nahe an den Gaumen, dass der Schluckreflex ausgelöst wird.

**VORTEILE des Flexy®-Löffel:**

Eine angenehme Erleichterung beim Essen eingeben!

Es wird viel weniger verkleckert. Das Essen eingeben geht nicht nur schneller, es wird auch sicherer. Ein Brechen oder Aufsplintern des Löffels ist ausgeschlossen. Somit kann eine Verletzungsgefahr beim Sturz mit dem Löffel im Mund nahezu ausgeschlossen werden.

**EMPFEHLUNGEN:**

Weitere Vorteile für die Arbeit der Logopäden ist die Möglichkeit der Stimulierung der Buccinatoren mit Hilfe des Flexy®-Löffels.

Aus diesem Grund empfiehlt der international bekannte Spezialist für Patienten mit orofacialen, neurologischen Störungen Prof. Dr. Castillo Morales den Flexy®-Löffel in seinen Seminaren.

---

**Flexy®-Löffel sicher und sauber**

**HYGIENE:**

- Vor Erstgebrauch 15 min. auskochen.
- Nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
- Sterilisierbar im Autoklav mit Wasserdampf bis 135 °C.
- Spülmaschinenfest.

## **MATERIAL:**

Das Material ist ein Elastomer und entspricht allen Richtlinien der EEC und FDA.

## **UNTERSUCHUNGEN:**

Die Untersuchung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) v. 30.7.2003 ergab: "keine Beanstandung"

## **SICHERHEIT:**

- Vor jeder Benutzung Reißfestigkeit durch kräftiges Ziehen am Mundteil prüfen.
  - Löffel stets auf Gebrauchsspuren prüfen.
  - Bei Beschädigung oder sichtbarer Alterung den Löffel austauschen.
  - Nicht in Kontakt bringen mit Stoffen auf rein öliger oder fettiger Basis.
  - Kontakt mit sauren Medien vermeiden.
  - Der Löffel ist als Kauspielzeug nicht geeignet.
- 

## **Flexy®-Löffel**

Den Löffel gibt es verblisteret (= verpackt):

unverblisteret (= lose):

- Flexy®-Löffel mini blau oder rot, Sh 70
- Flexy®-Löffel mini dunkelblau, Sh 80
- Flexy®-Löffel maxi rot, Sh 70
- Flexy®-Löffel maxi blau, Sh 80
- Flexy®-Löffel maxi dunkelblau, Sh 90
- Flexy®-Löffel 2K maxi Mundteil Sh 70, Griff Sh 90

